

Broken Instrument Removal Kit 36-1000 Podstawowa Instrukcja Użytkownika



Lista elementów w instrumencie:



- 1: Pokrętko regulacji naciągu
- 2: Pokrętko regulacji pozycji
- 3: Przycisk aktywacyjny
- 4: Ograniczający pierścień zatraskowy
- 5: Gniazdo pozycjonujące



Znak CE oznacza, że produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Przeznaczenie: Usuwanie złamanych pilników endodontycznych, w głębi kanału korzeniowego.

Elementy zestawu: Instrument Składa się z trzonka i części pracującej, oraz igieł.

Produkt niesterylny.

Technika pracy:

Zamontować igłę z pętłą z cienkim gwintem luer-lock na głowicy instrumentu, umieścić igłę w szczelinie, dokonać regulacji naciągu za pomocą pokrętkła regulacji naciągu, wyregulować do przybliżonej pozycji, użyć pokrętkła regulacji pozycji do zablokowania, a następnie użyć ruchomego przycisku do precyzyjnej regulacji do wymaganej długości i zaciśnąć za pomocą pierścienia ograniczającego po zakończeniu regulacji.

Uwaga:

- 1) Do użycia tylko przez wykwalifikowany personel medyczny;
- 2) Sprawdź stan instrumentu, przed użyciem.
- 3) Produktu należy używać ostrożnie, aby nie uszkodzić go w trakcie pracy względem innych narzędzi.

Sterylizacja i konserwacja:

1. Rękojeść nie jest sterylna i może być ponownie użyta. Igła z pętłą nie jest sterylna, jednorazowego użytku.
2. Uchwyt został poddany specjalnemu procesowi podczas produkcji, aby zapewnić ochronę przed rdzą. Mimo to trwałość urządzenia zależy od prawidłowego użytkowania i konserwacji zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed sterylizacją sprzęt powinien zostać wyczyszczony za pomocą ciepłej wody. Po każdym użyciu należy zdezynfekować sprzęt.
3. Przed użyciem instrumentu oraz igły z pętłą należy je wysterylizować zgodnie z instrukcjami urządzenia do sterylizacji wysokociśnieniowej i przechowywać w czystym i uporządkowanym miejscu.
4. Sprzęt należy zdezynfekować, umyć w celu usunięcia detergentu, a następnie wysuszyć przed sterylizacją. Instrument powinien być sterylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zalecana metoda sterylizacji:

Metoda	Parametry
Sterylizacja parowa	134°C, 5min

 **Zumax Medical Co., Ltd.**


5 Zhiying Street, New District, Suzhou, Jiangsu, China 215129

Phone: +86 512 66650502 Fax: +86 512 66909655

E-mail: sales@zumaxmedical.com

<http://www.zumaxmedical.com>

MedNet EC-REP GmbH

 Borkstrasse 10.48163 Münster, Germany

