

E-FLOW

Komputerowy system podawania znieczulenia stomatologicznego



ZESTAW
Gotowy
do użycia

Zakup bez
ukrytych
kosztów

Komfort
prawie
bez bólu

Numer patentu "ZL 2022 1 0413056.4"

**Opatentowana technologia
informacji zwrotnej.**

Precyzyjna kontrola ciśnienia w trakcie
podawania/wstrzykiwania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



OFICJALNY DYSTRYBUTOR
NEVADENT
DENTAL PRODUCTS SUPPLIER

nevadent.pl




Dokładna analiza podawanego znieczulenia

Precyzyjne informacje prezentowane w czasie rzeczywistym o objętości podanych znieczuleń oraz pozostałej dawce.




Dynamiczna prezentacja wartości ciśnienia

Dzięki czytelnemu wykresowi, oraz wartościach wyrażonych w jednostkach kPa, operator może na bieżąco kontrolować kluczowe elementy zabiegu."

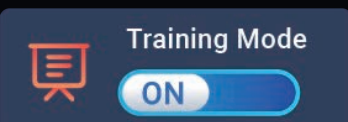

Inteligentny tryb treningowy

W trybie treningowym/nauki urządzenie podaje dodatkowe komunikaty głosowe i instrukcje, wspierając operatora w procesie zapoznawania się ze sprzętem i jego procedurami, aby jeszcze bardziej uprościć codzienne zadania.

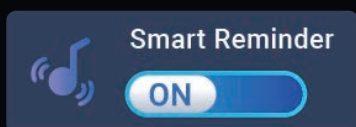

Wskazania głosowe

Capacity	80%	Jeden sygnał
	60%	Dwa sygnały
	40%	Trzy sygnały
	20%	Niski poziom ampułki
	0%	Pusta ampułka

Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, urządzenie automatycznie uruchomi komunikat głosowy (w trybie PDL). Każdy wzrost poziomu ciśnienia sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, co zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo.



PDL znieczulenie śródwładłowe

Specjalny tryb dedykowany PDL, zwiększa jego skuteczność dzięki możliwości adaptacyjnej prędkości wstrzykiwania znieczulenia.



Tryb dawkowania

Swobodny wybór wstrzyknięcia, bardziej stabilny i precyzyjny.



Intuicyjna kontrola sterownikiem nożnym

Czytelne komunikaty, pokazują status urządzenia w trakcie operowania sterownikiem w czasie rzeczywistym.

4 tryby wstrzykiwania wiele opcji do wyboru, możliwych do zmiany w trakcie zabiegu

Tryb PDL - niska prędkość
Tryb Normal - niska i średnia prędkość
Tryb Fast (szybki) - średnia i wysoka prędkość
Tryb Dosage (dawkowania) - niska i średnia prędkość

Normal	Fast	PDL	Dosage
0.3ml/min or 1.7ml/min	1.7ml/min or 3.5ml/min	0.3ml/min	0.3ml/min or 1.7ml/min

4.3 " Ekran dotykowy



Sterylizowalny pojemnik na igły

Zapobiega zakażeniom krzyżowym, bezpieczny i ergonomiczny



Automatyczna aspiracja

Dokładna identyfikacja miejsca wstrzyknięcia zmniejsza ryzyko powikłań w trakcie procedury znieczulenia, pomagając uniknąć podania leku donaczyniowo.

Lekka, poręczna głowica

Waga samej rękojeści, to zaledwie 40g a jej kabel o średnicy 3,4mm jest poręczny i elastyczny

SPECYFIKACJA

Model:
Waga:
Waga rękojeści:
Tryby wstrzykiwania:
Prędkość podawania:

E-FLOW
1.8kg±10%
40g
Normalny, Szybki, PDL
wolna (0.3ml/min)
średnia (1.7ml/min)
szybka (3.5ml/min)
2600mAh

Pojemność baterii:



◀ Zeskanuj kod
i sprawdź szkolenia

DentalCLASS
DENTAL COURSES & CONFERENCES

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

NEVA DENT
DENTAL PRODUCTS SUPPLIER

nevadent.pl